



Utilisation / pathologie	Transfert lit/fauteuil	Transfert fauteuil/fauteuil
Amputation fémorale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac avec/sans tête.
Amputation / sous-rotulienne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête.
Manque de tonicité membres inférieurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Universelle solide dossier bas. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Universelle solide dossier bas. ■ Sangle Universelle standard.
Très faible tonus du tronc, tête, personnes agitées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Universelle avec tête.
Aucun maintien de la tête	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Universelle avec tête plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Universelle avec tête plus.
Hémiplégie totale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus.
Hémiplégie partielle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Universelle standard.
Paraplégie avec tonus de tronc	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac sans tête. ■ Sangle Universelle dossier bas. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac sans tête. ■ Sangle Universelle dossier bas. ■ Sangle Universelle standard.
Paraplégie sans tonus de tronc	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle standard. ■ Sangle Universelle avec tête ■ Sangle Universelle avec tête plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle standard. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus.
Tétraplégie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Easy-fit à jambes séparées. ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus.
Bon maintien du tronc et des membres supérieurs pour lève-personnes verticalisateurs Reliant 350 et Roze	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle de Transfert sous axillaires : si bon tonus musculaire. ■ Sangle de Transfert sous axillaires avec sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle de Transfert sous axillaires : si bon tonus musculaire. ■ Sangle de Transfert sous axillaires avec sous-cuisses : si faible tonus musculaire.



Toutes ces sangles sont compatibles avec tous les lève-personnes, même d'autres marques, comprenant un système de fléau 2 ou 4 points. Elles s'adaptent sur les lève-personnes de la famille des *Invacare Birdie* et sur le lève-personnes *Invacare Jasmine*.

Informations

Il est important de faire une analyse de risque quant à l'état de la peau des personnes qui restent assises sur une sangle pendant de longues périodes.

La prescription médicale :

Code LPP 1280533

Désignation : Soulève-malade, achat de sangle

La guide d'évaluation lève-personnes et sangles est téléchargeable sur www.invacare.fr

Utilisation / pathologie	Transfert baignoire, douche et piscine	Transfert toilettes et changes
Amputation fémorale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac avec/sans tête.
Amputation / sous-rotulienne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle Standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Amputés. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Toilette.
Manque de tonicité membres inférieurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Toilette.
Très faible tonus du tronc, tête, personnes agitées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Universelle avec tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Toilette avec tête.
Aucun maintien de la tête	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Universelle avec tête Plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Toilette avec tête.
Hémiplégie totale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête. ■ Sangle Universelle avec tête plus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac avec tête. ■ Sangle Toilette avec tête.
Hémiplégie partielle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac avec/sans tête. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Toilette.
Paraplégie avec tonus de tronc	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac sans tête. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle standard. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac sans tête. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Toilette.
Paraplégie sans tonus de tronc	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle Standard. ■ Sangle Universelle avec tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Toilette avec tête.
Tétraplégie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac. ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Universelle avec tête. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle Hamac toilette. ■ Sangle Toilette avec tête.
Bon maintien du tronc et des membres supérieurs pour lève-personnes verticalisateurs Reliant 350 et Roze	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle de Transfert sous axillaires : si bon tonus musculaire. ■ Sangle de Transfert sous axillaires avec sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sangle de Transfert sous axillaires : si bon tonus musculaire. ■ Sangle de Transfert sous axillaires avec sous-cuisses : si faible tonus musculaire.

Sangles Invacare: Positionnement et utilisation



Sangle Universelle Invacare avec tête - Levage à partir du lit
 Cette vidéo montre comment installer et retirer la Sangle Universelle avec tête...
 ...voir la vidéo



Sangle Universelle Standard Invacare - Levage à partir d'une position horizontale
 Cette vidéo montre comment installer et retirer la Sangle Universelle Standard...
 ...voir la vidéo



Sangle Universelle Standard Invacare - Levage à partir du lit
 Cette vidéo montre comment installer et retirer la Sangle Universelle Standard Invacare...
 ...voir la vidéo



Sangle Easy Fit Invacare à jambes séparées - Utilisée pour personnes amputées
 Cette vidéo montre comment installer et retirer la Sangle Easy Fit ...
 ...voir la vidéo

Retrouvez les vidéos d'installations de nos sangles sur notre site internet www.invacare.fr rubrique Vidéos.